



## CHOIX ET ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES

| 1  | 2   | 3  | 4                              |
|--|---|--|--------------------------------|
| <b>TUBE CITRATE</b><br>(bleu)  | <b>TUBE SEC</b><br>(rouge)  | <b>TUBE K2 EDTA</b><br>(violet)  | <b>TUBE FLUORURE</b><br>(gris) |
| INR - TP - TCA<br><br><div style="border: 1px solid white; padding: 5px; margin: 5px 0;">TCA suivi de traitement par héparine***</div> Fibrinogène<br><br><div style="border: 1px solid white; padding: 5px; margin: 5px 0;">D-Dimères***</div><br><i>À remplir jusqu'au trait</i><br><br><u>Si Plaquettes sur citrate</u> , prélever obligatoirement un EDTA supplémentaire | <u>1 tube dédié</u><br>Chimie<br>Hormones<br>Protéines<br>Vitamines :<br>D, B9, B12<br>Sérologies <sup>(1)</sup><br>Marqueurs tumoraux <sup>(1)</sup><br><br><div style="border: 1px solid white; padding: 5px; margin: 5px 0;">LDH**<br/>Mg**, P**, K**<br/>PSAL**</div><br><sup>(1)</sup> <u>1 tube supplémentaire</u><br><br><u>1 tube supplémentaire pour les paramètres suivants</u><br>Électrophorèse<br>Allergie<br>Auto anticorps<br>BNP<br><div style="border: 1px solid white; padding: 5px; margin: 5px 0;">Troponine***</div><br><div style="border: 1px solid white; padding: 5px; margin: 5px 0;">Procalcitonine***</div> | <u>1 tube dédié</u><br>NFS - VS<br>Plaquettes<br>Réticulocytes<br>Hb glyquée (HbA1c)<br><br><div style="border: 1px solid white; padding: 5px; margin: 5px 0;">Paludisme*** (1)</div><br><sup>(1)</sup> <u>2 tubes même si NF non prescrite</u><br><br><u>1 tube dédié</u><br>Groupes<br>Phénotypes<br>RAI<br>Nom de naissance obligatoire<br><br><u>1 tube dédié</u><br>Recherches génétiques (mutations)<br>HLA B27<br>Joindre consentement éclairé et attestation de consultation | Glycémie                       |



Respecter les conditions d'acheminement

**Étiquettes prioritaires** à utiliser pour une prise en charge rapide au laboratoire

\*\*\* en urgence (maximum 2h)  
\*\* ou prioritaire (maximum 5h)

### CONDITIONS PRÉ-ANALYTIQUES

L'ensemble des exigences pré-analytiques est disponible sur [www.allianceanabio.fr](http://www.allianceanabio.fr).  
Pour toute autre analyse, veuillez contacter le laboratoire.

### COMMANDE DE MATÉRIEL

**Veuillez m'adresser le matériel suivant**

Boîtes de prélèvement sanguin : .....  
 Flacons boratés (ECBU) : ..... Flacons non boratés (chimie urinaire) : .....  
 Pots à coproculture : ..... Ecouvillons : ..... Flacons de 24h : .....

**INFORMATION AU PATIENT** : Le laboratoire Alliance AnaBio respecte le règlement Général sur la Protection des Données personnelles ; vous pouvez contacter par écrit le délégué à la protection des données de votre laboratoire.

[www.allianceanabio.fr](http://www.allianceanabio.fr)